

Проведение тренинга по ЭЭГ

Для проведения тренинга по ЭЭГ, регистрация осуществляется в монополярном режиме по 4 каналам ЭЭГ (т.е. имеется один референтный электрод в виде прищепки, который устанавливается на мочку уха, а сигнал регистрируется каждым из 4 каналов ЭЭГ одновременно относительно референтного электрода). Возможно использование меньшего количества каналов (1, 2).

При проведении тренинга по ЭЭГ из комплекта поставки выберите ленту требуемого размера (S или L) с предустановленными электродами и наденьте на голову пациента. Установите требуемое количество модулей регистрации в специальные кармашки на ленте и подключите к ним отводящие провода в разъем micro USB на модуле регистрации. На мочку уха установите референтный электрод, выполненный в виде прищепки. При помощи шприца и иглы из комплекта поставки введите гель под электрод через специальное отверстие в электроде. Убедитесь, что гель контактирует с кожей пациента. После чего проведите тренинг.

