

Проведение тренинга по дыханию

Для проведения тренинга по дыханию применяется длинный отводящий провод с разъемом micro USB. Тренинг по дыханию осуществляется по одному каналу. При проведении тренинга установите отводящий провод в разъем micro USB на модуле регистрации. Закрепите одноразовые поверхностные электроды на отводящем проводе. Наденьте на пациента ленту для крепления модуля регистрации на грудь и зафиксируйте ее по размеру. Установите модуль регистрации в специальный кармашек на ленте. Удалите защитную пластиковую подложку с электрода и наклейте на грудь как показано на рисунке. Включите модуль регистрации при помощи нажатия на кнопку включения/выключения удерживая ее в течении одной секунды. Проведите тренинг в соответствии с выбранным типом. После чего снимите с пациента модуль регистрации, ленту и одноразовые электроды. Утилизируйте электроды стандартным способом и продезинфицируйте модуль регистрации и отводящий провод.

