

Проведение тренинга по КИГ

Тренинг по КИГ осуществляется по одному каналу. При проведении КИГ тренинга закрепите одноразовые поверхностные электроды на модуле регистрации при помощи клемм, расположенных на нижней части модуля регистрации. Удалите защитную пластиковую подложку с электрода и наклейте модуль регистрации на грудь пациента в область сердца. Включите модуль регистрации при помощи нажатия на кнопку включения/выключения удерживая ее в течении одной секунды. Проведите тренинг в соответствии с выбранным типом. После чего снимите с пациента модуль регистрации и одноразовые электроды. Утилизируйте электроды стандартным способом и продезинфицируйте модуль регистрации.

