

## Проведение тренинга по ЭМГ

В зависимости от тренируемой мышцы установка модуля регистрации осуществляется двумя способами:

- 1) без использования отводящего провода;
- 2) с использованием отводящего провода.

Внимание! Для проведения тренинга по ЭМГ с использованием отводящего провода применяется короткий отводящий провод с разъемом micro USB.

При проведении электромиографического тренинга без использования отводящих проводов закрепите одноразовые поверхностные электроды на модуле регистрации при помощи клемм, расположенных на нижней части модуля регистрации. После чего наденьте на пациента ленту для крепления модуля регистрации и отрегулируйте ее по размеру. В специальный кармашек на ленте поместите модуль регистрации с установленными электродами. После чего удалите защитную пластиковую подложку с электрода и наклейте на исследуемую мышцу пациента. Включите модуль регистрации при помощи нажатия на кнопку включения/выключения удерживая ее в течении одной секунды. Проведите тренинг в соответствии с выбранным типом. По завершению проведения тренинга снимите с пациента модуль регистрации, ленту для крепления модуля регистрации и одноразовые электроды. Утилизируйте электроды стандартным способом и продезинфицируйте модуль регистрации.

**ВНИМАНИЕ! КОЖА ПАЦИЕНТА, В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ, ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ!**



Для проведения ЭМГ тренинга с использованием отводящего провода установите отводящий провод в разъем micro USB на модуле регистрации. После чего порядок действий аналогичный при проведении тренинга без использования отводящих проводов.

